




Rev. 20/02/2025

CRYOPUSH V₃
CRYO
BY **NOV**

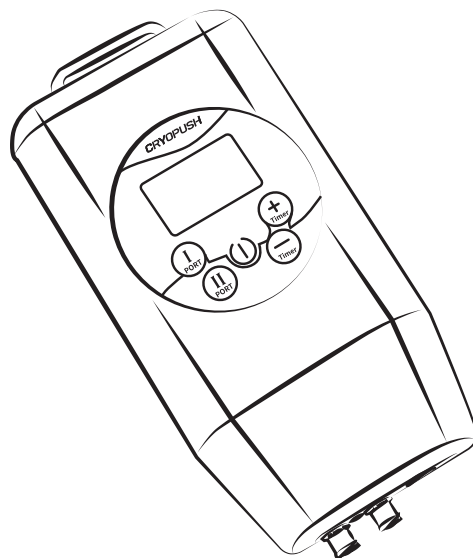

Nous contacter

CRYONOV
22 Avenue d'Albi
81150 MARSSAC SUR TARN
FRANCE

☎ 05 25 23 06 55

✉ contact@cryonov.com

🌐 www.cryonov.com



MANUEL D'UTILISATION

Module CryoPush V3
Code produit : A02-P-001

SOMMAIRE

1. Mises en garde importantes	1
2. Avertissement	2
3. Présentation du Module CryoPush V3	3
4. Instructions d'utilisation	5
5. Spécifications	7
6. Pack de froid	7/8
7. Dépannage	8
8. Nettoyage, Maintenance et Stockage	9
9. Garantie	9/10
10. Composition du colis	10

1. Mises en garde importantes

- 1). Ne jamais utiliser l'appareil dans un environnement humide, en cas de forte chaleur ou d'intempérie.
- 2). Contient de petites pièces, seuls les professionnels sont autorisés à démonter l'appareil.
- 3). Le module ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- 4). Seules les enveloppes de la gamme doivent être utilisées sur le module CryoPush V3.
- 5). Ne pas faire subir des chocs extrêmes au module CryoPush V3, tels qu'une chute.
- 6). Ne jamais lancer une séance avant d'avoir fixé l'enveloppe ou le kit autour du membre à traiter.
- 7). Ne jamais laisser fonctionner avec une enveloppe ouverte ou posée à plat. Cela pourrait engendrer une dégradation de l'enveloppe.
- 8). En cours de séance, bien attendre la fin d'un cycle de gonflage pour arrêter le module CryoPush V3.
- 9). A chaque fin d'utilisation, dévisser le tuyau et laisser l'enveloppe se dégonfler avant la prochaine utilisation. Si nécessaire, appliquer de légères pressions intermittentes avec les mains sur la chambre à air pour évacuer l'air résiduel.
- 10). Dans le cadre de l'utilisation du pack de froid, se référer au paragraphe 6.
- 11). Utiliser le module Cryopush V3 uniquement sur les membres à traiter et conformément aux instructions.
- 12). Tenir à l'écart de l'eau ou tout autre liquide.
- 13). Un intervalle d'une heure est fortement recommandé entre chaque utilisation.

ATTENTION

- Le module CryoPush V3 contient une batterie rechargeable, en lithium-ion, à manipuler avec précaution.
- Ne pas jeter au feu, ni avec les ordures ménagères. Le module CryoPush V3 et son emballage doivent être déposés dans des points de collecte adaptés.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni dans la boîte.
- En cas de sensations d'engourdissements, de battements ou de pulsations, l'enveloppe est peut-être trop serrée. La desserrer immédiatement.
- Arrêter d'utiliser l'appareil en cas de gonflement du membre et consulter votre médecin.
- S'assurer que le module CryoPush V3 est éteint et débranché pendant le nettoyage ou la désinfection.

2. Avertissement

N'utilisez PAS le module CryoPush V3 si l'une des conditions suivantes s'applique :


- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte ou membre insensible à la douleur,
- Ne pas utiliser en cas d'intolérance au froid ;
- Cesser immédiatement l'utilisation du matériel en cas de douleur, gonflement, rougeurs importantes, brûlure, démangeaisons ou changement cutané.
- N'utilisez pas la machine lorsqu'elle est endommagée.
- Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de troubles cognitifs ou ayant des difficultés à communiquer ne doivent pas utiliser le produit seuls, sans surveillance.

3. Présentation du module CryoPush V3

Le module CryoPush V3 est un appareil de compression intermittente utilisé avec des enveloppes gonflables CryoPush pour simuler le frottement et le massage des tissus par les mains. Cette action de massage aide à la relaxation des muscles.

Le module CryoPush gonfle les enveloppes à une pression spécifiée de 20 mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg, 80 mmHg ou 100 mmHg (réglée par l'utilisateur), et une fois que la pression est atteinte, celle-ci se maintiendra pendant 10 secondes avant de se relâcher. Les cycles sont répétés pendant 30 minutes ou pendant la durée définie par l'utilisateur. Les piles au lithium rechargeables intégrées permettent au système d'être totalement transportable pour réaliser une séance à tout moment, et n'importe où.

Module CryoPush V3

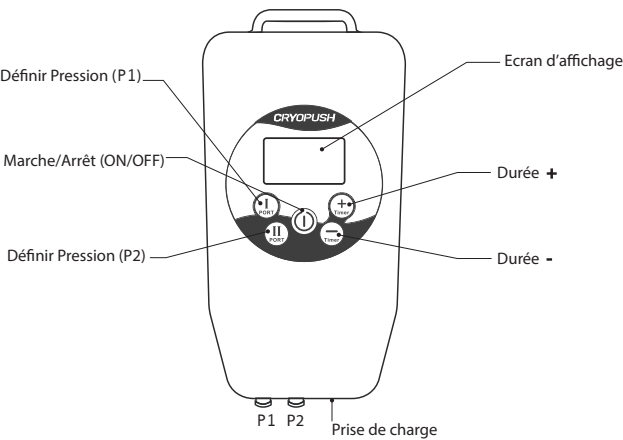


Ecran d'affichage



4. Instructions d'utilisation

Préparation de l'enveloppe et pack de froid


- 1.1 Préparer le pack de froid. (se référer à la page 7 - Paragraphe 6. Pack de froid).
- 1.2 Positionner l'enveloppe à plat, avec les bandes velcros apparentes, puis fixer le pack de froid sur l'enveloppe (1, 2).
- 1.3 Veiller à toujours placer le jersey de protection (fourni avec le pack de froid Genou/Cuisse), ou un tissu sur votre peau avant chaque utilisation. Placer l'enveloppe et le pack de froid sur le membre à traiter (3). Fermer correctement l'enveloppe à l'aide des fixations velcro (4).
- 1.4 Brancher le tuyau connecteur de l'enveloppe au module CryoPush V3 (5).

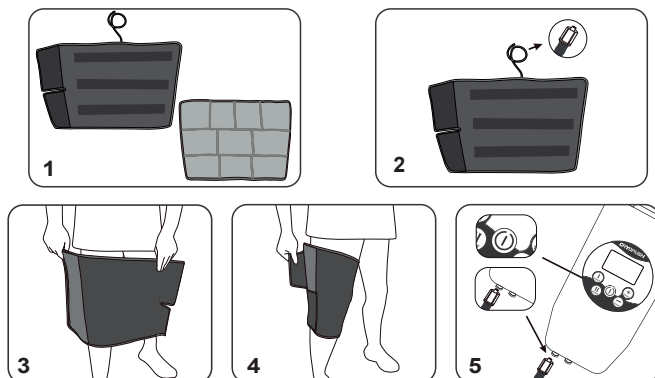

Démarrer le module CryoPush V3

- 1.5 Pour mettre le système sous tension, appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt » pendant 3 secondes. Si l'écran d'affichage ne s'allume pas, connecter l'alimentation secteur pour charger la batterie, il est déconseillé d'utiliser le module pendant la recharge de la batterie (6).

- 1.6 Appuyer sur le bouton P1/P2 pour régler la pression. Attendre 3 secondes avant le démarrage de la séance. La pression peut être réglée pendant la séance (7).
- 1.7 Appuyer sur le bouton Timer + ou Timer - pour régler la durée de la séance et le système commencera à fonctionner après 3 secondes (8). Le temps de la séance est par défaut de 30 minutes. Si vous ne définissez pas la durée, le système s'arrêtera automatiquement après 30 min de fonctionnement.
- 1.8 Lorsque l'écran d'affichage est allumé, appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pour éteindre l'unité.

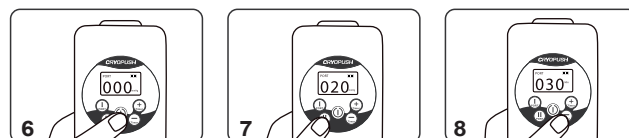

NOTES :

- 1). Il est possible de connecter une ou deux enveloppes à la fois au module CryoPush V3, en vissant le tuyau sur le Port P1 et/ou le Port P2.
- 2). L'écran affiche la valeur de pression en temps réel.
- 3). Lors de l'utilisation du module, s'assurer que l'enveloppe est correctement connectée au Port P1 ou P2.
- 4). Si le niveau de pression programmé n'est pas atteint au bout de quelques minutes, le système émettra une alarme et l'indicateur du port correspondant clignotera et l'appareil s'éteindra. Vérifier si l'enveloppe est correctement connectée ou si elle présente une fuite.
- 5). L'indicateur du niveau de charge de la batterie est situé sur l'écran d'affichage. Veiller à recharger le module CryoPush V3 dès que le témoin indique que le niveau de batterie est faible.
- 6). Utiliser uniquement les enveloppes CryoPush V3 by Cryonov avec le module CryoPush V3.

5. Spécifications

Code Produit (Module CryoPush V3)	A02-P-001
Tension d'entrée du transformateur	100-240V, 50-60Hz
Tension de sortie du transformateur	12V, 2A
Gamme de compression (en mm Hg)	20, 40, 60, 80 et 100 mm Hg
Durée des cycles	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 min
Dimension (Module CryoPush V3)	17,3*8,2*4 cm
Poids Net	340g
Capacité de la batterie	2600 mAh
Durée de recharge complète de la batterie	4 heures
Durée de fonctionnement de la batterie à pleine charge	Environ 10 heures
Niveau sonore	≤ 55dB

NB :

- La plage de température recommandée est de 5°C ~ 40°C.
- La plage de taux d'humidité pour l'utilisation du module CryoPush V3 est de 10% ~ 90%.
- Le réglage par défaut du temps d'utilisation du Module CryoPush V3 est de 30 minutes.

6. Pack de froid



En cas d'utilisation du pack de froid, celui-ci ne doit jamais être en contact direct avec la peau. Veiller à toujours placer un tissu de protection (ou un vêtement léger) entre le pack de froid et le membre à traiter. Pour le pack de froid Genou/Cuisse, un jersey de protection est fourni.

Le pack de froid peut être mis soit au réfrigérateur soit au congélateur, pendant au moins 2 heures. Ce choix ainsi que le temps de réfrigération sont laissés à l'appréciation de l'utilisateur en fonction de ses besoins. En cas de mise au congélateur, ne pas régler le thermostat sur une température plus basse que -18°C.

Si le pack de froid n'est pas malléable et/ou présente du givre, attendre qu'il s'assouplisse et dégivrer avant toute utilisation.



Ne pas percer le pack de froid, ni son tuyau de raccordement.

En cas de fuite: ne pas ingérer le gel, manipuler avec des gants, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau. Ne pas jeter dans la nature, ni avec les ordures ménagères. Déposer dans une décharge disposant d'un point de collecte pour les déchets chimiques.

En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Contacter votre médecin en cas d'irritation persistante.

Ne pas chauffer le pack de froid.

Ne pas utiliser en cas de dégradation.

7. Dépannage

Problème	Solution
Le module ne démarre pas	La batterie est déchargée, mettre en place l'adaptateur secteur et faire un cycle de charge.
L'utilisateur ne sent pas de massage ni de pression	• L'enveloppe n'est pas assez serrée. • Le tuyau n'est pas correctement connecté. • L'enveloppe est endommagée avec présence de fuite d'air.
La pression est trop élevée	• Vérifier que la pression désirée est correcte. • Diminuer la pression affichée. • Desserrer l'enveloppe. • Contacter la société Cryonov ou son représentant.
Alarme sur le Port P1 ou P2 L'indicateur clignote	• Vérifier que l'enveloppe est bien connectée sur le port sélectionné. • Le tuyau est mal connecté. • L'enveloppe est endommagée avec présence de fuite d'air. Contacter la société Cryonov ou son représentant.

- Si l'enveloppe est trop gonflée, dévisser le tuyau et laisser l'enveloppe se dégonfler avant la prochaine utilisation. Si nécessaire appliquer de légères pressions intermittentes avec les mains sur la chambre à air pour évacuer l'air résiduel.

8. Nettoyage, Maintenance et Stockage

ATTENTION : Le module CryoPush V3 doit être éteint et débranché de la prise secteur (prise murale) avant le nettoyage ou la désinfection.

- Nettoyer les surfaces du module CryoPush V3 avec un chiffon doux légèrement humide ou imprégné d'un savon doux.
- Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de javel.
- Ne pas mettre les enveloppes au congélateur.
- Ne pas mettre les enveloppes dans un sèche-linge.
- Laver à la main l'extérieur de l'enveloppe et le pack de froid à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool isopropylique à 70% et laisser sécher à l'air libre.

9. Garantie

Cryonov garantit que le module CryoPush V3, s'il est bien utilisé, sera exempt de vices matériels et de main-d'œuvre pendant une période d'un an avec une durée de vie limitée à 2000 heures, et suivant la date à laquelle le module CryoPush V3 a été acheté.

Si le module CryoPush V3, visé par cette garantie limitée, tombe en panne pendant la période de garantie pour les raisons couvertes par cette garantie limitée, Cryonov pourra, à sa discrétion :

- Réparer le module CryoPush V3 OU
- Remplacer le module CryoPush V3 par un autre module CryoPush V3.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du module CryoPush V3 et n'est pas transférable.

Cryonov ne fait aucune garantie expresse autre que celles énoncées ici.

Dans le cas d'un défaut de fabrication, les enveloppes et pack de froid peuvent être renvoyés dans un délai de 7 jours après l'achat.

En cas de panne, nous vous remercions de prendre contact avec la société Cryonov ou un de ses représentants locaux.

Afin d'obtenir un service après-vente sous garantie, nous vous remercions de joindre une copie de la facture d'achat.

Les enveloppes ont une durée de vie de 200 heures.

Portée de la garantie

La garantie ne couvre pas les dommages dus à des causes externes, notamment et sans s'y limiter, les accidents, les utilisations non conformes aux instructions du produit, une mauvaise utilisation, une négligence, une modification, une usure normale ou les réparations.

Attention

Aucune modification ni de l'enveloppe, ni du module CryoPush V3 n'est autorisée.

10. Composition du colis

NOM	Quantité
Module CryoPush V3	1
Adaptateur AC 12V/2V	1
Manuel d'utilisation	1

NB : Kits

Pour chaque référence (Pied/Chevilles, Genou/Cuisse, Epaule, Coude, Hanche), le kit se compose d'une enveloppe et du pack de froid correspondant.

Chaque enveloppe peut être utilisée seule pour une séance de massage (après un effort musculaire ou un traumatisme sportif) **ou** en combinaison avec un pack de froid pour augmenter les bénéfices de la récupération.

Les enveloppes et les packs de froid peuvent être achetés séparément.

CRYO PUSH V3 n'est pas un dispositif médical.